

PHEMFILCON A LENTI A CONTATTO MORBIDE GIORNALIERE A SOSTITUZIONE MENSILE



ISTRUZIONI PER L'USO – IL PRESENTE FOGLIO ILLUSTRATIVO CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULL'USO CORRETTO E SICURO DEL PRODOTTO. LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN'EVENTUALE CONSULTAZIONE FUTURA. LE LENTI A CONTATTO DEVONO ESSERE SEMPRE APPLICATE DA UNO SPECIALISTA DEL SETTORE. PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLE LENTI È ESSENZIALE ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DELLO SPECIALISTA DI FIDUCIA E A TUTTE LE INDICAZIONI FORNITE SULLA CONFEZIONE DELLE LENTI.



ATTENZIONE: La Legge Federale Americana (USA) limita la vendita di questo dispositivo solo a, o su ordine di uno specialista qualificato.

NOMI DEI PRODOTTI:

FRESHLOOK® COLORBLEND®

FRESHLOOK® COLORS

FRESHLOOK® DIMENSIONS

MATERIALE E CONFEZIONE

Le lenti a contatto morbide **FRESHLOOK® COLORBLEND®**, le lenti a contatto morbide **FRESHLOOK® COLORS** e le lenti a contatto morbide **FRESHLOOK® DIMENSIONS** contengono il 45% di phemfilcon A (con cromofori UV assorbenti) e il 55% di acqua.

Le lenti a contatto **FRESHLOOK® COLORBLEND®**, le lenti a contatto **FRESHLOOK® COLORS** e le lenti a contatto **FRESHLOOK® DIMENSIONS** sono confezionate in singoli blister contenenti soluzione salina isotonica tamponata al borato. La soluzione salina contiene lo 0,005% di Poloxamer.

Le lenti a contatto **FRESHLOOK® COLORBLEND®** e le lenti a contatto **FRESHLOOK® COLORS** contengono un rivestimento intermittente contenente una combinazione dei seguenti pigmenti: ossidi di ferro, biossido di titanio, [ftalocianinato (2-)] rame, ossido di cromo, violetto carbazolo e verde ftalocianina.

Le lenti a contatto **FRESHLOOK® DIMENSIONS** sono colorate con verde ftalocianina e contengono un rivestimento intermittente contenente una combinazione dei singoli pigmenti: ossidi di ferro, [ftalocianinato (2-)] rame, ossido di cromo, violetto carbazolo, verde ftalocianina.

Le lenti sono sterilizzate in autoclave.

Utilizzare solo se il singolo blister è intatto.



INDICAZIONI D'USO

Tutte le lenti in phemfilcon A sono destinate all'uso diurno per la correzione ottica, in uno o in entrambi gli occhi, in persone che non presentano patologie oculari, con lieve astigmatismo che non interferisce con la visione.

CONSIGLI PER L'USO E LA SOSTITUZIONE

USO DIURNO – meno di 24 ore durante lo stato di veglia. La durata del periodo d'uso può essere incrementata gradualmente, fino al raggiungimento del massimo consigliato. **LE LENTI DEVONO ESSERE TOLTE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE.** Nell'interesse del mantenimento della salute dei vostri occhi, la durata dell'utilizzo dovrebbe essere stabilita dallo specialista di fiducia.

Noi raccomandiamo di gettare e sostituire le lenti con un paio nuovo ogni mese.

MANIPOLAZIONE DELLE LENTI

Le istruzioni dettagliate per l'inserimento e la rimozione delle lenti a contatto dovrebbero essere fornite dallo specialista di fiducia.

Alcon®

a Novartis company

Lavare e asciugare sempre le mani prima di manipolare le lenti. Agitare delicatamente il blister prima di aprirlo. Rimuovere la lamina che ricopre il blister. Porre le lenti sul palmo della mano o, se necessario, utilizzando il dito indice, farle scivolare delicatamente fuori dal contenitore. Verificare che la lente non sia capovolta e che sia la lente corretta per quell'occhio. Esaminare le lenti prima di indossarle e non utilizzarle se sono danneggiate.

Prima di rimuovere le lenti, verificare che le mani siano completamente asciutte. Ammicciare più volte guardando verso l'alto e fare scivolare la lente sulla parte bianca dell'occhio. Rimuovere la lente prendendola delicatamente tra il pollice e l'indice. Se la lente si sposta dal centro dell'occhio, chiudere l'occhio e massaggiare delicatamente la palpebra per riportare la lente nella posizione centrale. Se il problema persiste, consultare lo specialista di fiducia.

Non usare mai pinzette, ventose, oggetti appuntiti o le unghie per rimuovere le lenti dal porttalenti o dagli occhi.

SE CI SI ADDORMENTA INDOSSANDO LE LENTI

Se ci si addormenta inavvertitamente per un breve periodo indossando le lenti, è improbabile che si manifestino effetti avversi. Tuttavia al risveglio è possibile avvertire lenti come secche, disidratate; per porvi rimedio è sufficiente battere le palpebre più volte.

COME PRENDERSI CURA DELLE PROPRIE LENTI

- LA CORRETTA MANUTENZIONE DELLE PROPRIE LENTI È FONDAMENTALE
- DISINFETTARE le lenti ad ogni rimozione, per distruggere germi nocivi e per assicurare un uso sicuro e confortevole
- Lo specialista di fiducia può consigliare una PULIZIA e RISCACQUO in fasi separate per rimuovere agenti contaminanti dalla superficie della lente. Le lenti possono inoltre necessitare una pulizia enzimatica periodica, per rimuovere le proteine.
- Lo specialista di fiducia sceglierà il sistema per la manutenzione delle lenti più idoneo. Noi raccomandiamo l'utilizzo dei prodotti seguenti con le lenti in phemfilcon A:

Soluzioni disinfettanti al perossido di idrogeno

AOSEPT[^] Plus con Hydraglyde


Soluzioni per la pulizia e la disinfezione chimica a freddo

OPTI-FREE[®] Pure-Moist[®]

OPTI-FREE[®] Express[®]

- Consultare lo specialista di fiducia prima di utilizzare qualsiasi altro prodotto per la manutenzione delle lenti.
- Non alternare o mescolare prodotti per la manutenzione delle lenti appartenenti a sistemi diversi.
- Utilizzare soltanto prodotti per la disinfezione di lenti a contatto morbide, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore.
- NON UTILIZZARE IL CALORE NE' PRODOTTI FORMULATI PER LENTI RIGIDE O RIGIDE GASPÉRMEABIL.

Ricordare sempre quanto segue:

- Lavare, risciacquare ed asciugare sempre le mani prima di manipolare le lenti a contatto.
- Non conservare mai le lenti per tutta la notte solo nella soluzione salina. La soluzione salina NON protegge le lenti dai germi né gli occhi da eventuali infezioni.
- Non riutilizzare la soluzione già usata contenuta nel porttalenti.
- Non utilizzare mai le soluzioni dopo la data di scadenza. 
- Risciacquare ogni giorno il porttalenti con soluzione salina sterile o soluzione unica fresca, se indicato, lasciarlo asciugare all'aria. Ciò contribuisce ad evitare contaminazioni e gravi lesioni oculari.
- Sostituire regolarmente il porttalenti.

SE NON SI PORTANO LE LENTI PER ALCUNI GIORNI, seguire le istruzioni del programma manutenzione delle lenti e, se necessario, pulire e disinfettare di nuovo le lenti, prima di rimetterle.

QUANDO NON UTILIZZARE LE LENTI

Le lenti non devono essere indossate in concomitanza con alcune condizioni di salute o ambientali. Le condizioni che possono interferire con un uso sicuro delle lenti a contatto sono:

- Allergia, infiammazione, infezione o irritazione all'interno o intorno all'occhio o alle palpebre.
- Periodi di cattiva salute, come forti raffreddori o influenza.
- Uso di alcuni farmaci, inclusi farmaci oftalmici.
- Lacrimazione insufficiente (secchezza oculare).
- Ambienti eccessivamente asciutti o polverosi che possono rendere poco confortevole l'utilizzo delle lenti.
- Sport acquatici senza l'uso di occhiali da piscina.

Consultare il proprio specialista di fiducia su queste o altre condizioni.

PROBLEMI POSSIBILI

Anche se le lenti a contatto morbide offrono numerosi vantaggi a chi le indossa, è possibile che si manifestino inconvenienti, riconoscibili in una o più delle seguenti condizioni:

- Sensazione di corpo estraneo
- Lenti fastidiose
- Rossore oculare
- Sensibilità alla luce
- Bruciori, fitte, prurito o lacrimazione accentuata
- Riduzione dell'acuità visiva
- Arcobaleni o aloni intorno alle luci
- Aumento della secrezione oculare
- Fastidio/dolore
- Secchezza oculare grave o persistente

Questi sintomi, se ignorati, possono provocare complicanze gravi.

CHE COSA FARE SE SI MANIFESTA UN PROBLEMA


Se si verifica uno dei sintomi precedenti:

- **RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LALENTE (O LE LENTI).**
- Se i fastidi o i problemi cessano, controllare attentamente le lenti.
- Se la(e) lente(i) è in qualche modo danneggiata, NON riutilizzarla(le), ma sostituirla(le) con una lente(i) nuova e consultare lo specialista di fiducia.
- Se la(e) lente(i) è(sono) sporca(che) o presenta ciglia o altri corpi estranei, o se il problema scompare e la(e) lente(i) non appare danneggiata, è sufficiente sciacquarla accuratamente e disinfettarla/neutralizzarla, prima di indossarla nuovamente.
- Se i sintomi citati persistono dopo la rimozione o prima dell'inserimento della(e) lente(i) nuova(e), rimuovere la(e) lente(i) **IMMEDIATAMENTE** e consultare tempestivamente il proprio specialista di fiducia. Potrebbe essere presente una condizione seria quale infezione, ulcera corneale (cheratite ulcerativa) o irite. Queste condizioni potrebbero progredire rapidamente, provocando la perdita permanente della vista. Reazioni meno gravi quali abrasioni, colorazioni epiteliali e congiuntiviti batteriche, devono essere affrontate e trattate tempestivamente per evitare complicanze.
- La secchezza occasionale può essere risolta utilizzando gocce lubrificanti o umettanti. Se la secchezza persiste consultare lo specialista di fiducia.
- Se una lente aderisce (smette di muoversi) applicare alcune gocce di soluzione lubrificante e aspettare finché la lente non inizia a muoversi liberamente nell'occhio prima di cercare di rimuoverla. Se la lente continua ad aderire, contattare **IMMEDIATAMENTE** lo specialista di fiducia.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il rischio di un possibile problema può essere ridotto riconoscendo i segni e seguendo l'avvertenza, "Che cosa fare se si manifesta un problema". Una corretta pulizia e una regolare sostituzione del porta-lenti è essenziale. L'utilizzo delle lenti a contatto aumenta il rischio d'infezioni oculari. Il fumo aumenta il rischio di cheratite ulcerativa per i portatori di lenti a contatto.

COSE IMPORTANTI DA RICORDARE

- **Non condividere** le proprie lenti con nessuno in quanto potrebbe verificarsi un contagio microbico tale da provocare gravi problemi alla salute oculare.
- Controllare ogni giorno i propri occhi per assicurarsi che la visione sia chiara, non diano fastidio e abbiano un aspetto sano.
- Si raccomanda ai portatori di lenti a contatto di recarsi regolarmente dal proprio specialista come indicato.
- Non utilizzare le lenti dopo la data di scadenza. 
- In condizioni di poca luce i portatori di lenti colorate potrebbero riscontrare una visione ridotta degli oggetti a basso contrasto.
- Annotare la corretta gradazione della lente per ciascun occhio.
- Prestare attenzione all'uso di saponi, lozioni, creme, cosmetici o deodoranti, poiché possono provocare irritazione se vengono a contatto con le lenti.
- Inserire le lenti **prima** di truccarsi e rimuoverle **prima** di struccarsi.
- Evitare l'utilizzo di prodotti spray vicino agli occhi quando si indossano le lenti poiché potrebbero provocare irritazione.
- Consultare lo specialista di fiducia per l'utilizzo delle lenti durante le attività sportive incluso il nuoto.
- In caso di esposizione a vapori nocivi o irritanti, rimuovere le lenti.
- Le lenti a contatto non devono mai entrare in contatto con acqua non sterile (inclusa l'acqua di rubinetto e saliva) in quanto possono verificarsi contaminazioni microbiche che potrebbero provocare danni permanenti agli occhi.
- Informare il proprio datore di lavoro che si indossano le lenti a contatto, in particolare se il lavoro prevede l'impiego di dispositivi di protezione oculare.
- Non indossare le lenti mentre si dorme.



FABBRICANTE:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA



RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

PER LA COMUNITÀ EUROPEA:

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park, Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, United Kingdom

Distribuito da:

Alcon Italia S.p.A.
Viale Giulio Richard 1/B
20143 Milano

CE
0086

Abbreviazioni per le specifiche delle lenti:

DIA	Diametro
BC	Raggio base
PWR/SPH	Potere
L	Sinistra
R	Destra

Data di preparazione:

2015-04

* Un marchio di Novartis
^ Un marchio di American Optical

© 2014-2015 Novartis

91018016-0415

CORP-000107 - Revised 08/04/14

Alcon[®] PACKAGING

FILE NAME: **91018016 | PHEM A IT**

ARTIST:	SIGNATURE:	REV:	DATE:
Goad, Richard, FORT		NEW	04.10.2015
WORTH, Alcon			01:12 PM

SPECIAL INSTRUCTIONS:

COLORS:
K

Alcon[®] PROOFREADING REPORT

- Proofreading (Manual)
- Text Verification System (TVS)

INSPECTION RESULTS:
of Errors:

TYPE OF INSPECTION:	SETTINGS:
<input type="checkbox"/> Electronic / Electronic	Dimmer: _____ Zoom: _____
<input type="checkbox"/> Hardcopy / Hardcopy	Aperture: _____ Focus: _____
_____ # of Images	

- See Catalyst docket for all other approvals

APPROVALS:

- Approved
- Correct & Return

SIGNATURE:

DATE:



By Goad, Richard, FORT

1:14 pm, Apr 10, 2015